

脱敏剂常见问题解答

1、格鲁玛脱敏剂使用时需要光照吗？

答：不需要。只需要将牙面清洁，干燥、隔湿后，在牙齿表面涂布脱敏剂，大约 30-60 秒，再轻吹，最后用水冲洗干净就可。

2、格鲁玛脱敏剂使用后，为何有时出现局部口腔粘膜发白？

答：这是由于医生在操作中，不慎在粘膜表面沾染了脱敏剂导致。数天后，粘膜会自行恢复正常。

3、格鲁玛脱敏剂的效果持续时间有多久？

答：格鲁玛脱敏剂的效果持续时间长达 12 个月。

4、格鲁玛脱敏剂使用后，效果不明显怎么办？

答：格鲁玛是通过渗入牙本质效果 200 μ m，并阻断牙本质小管液的流动来达到脱敏效果的，临床效果非常好。但是由于患者的个体差异，有时会出现一次使用后效果不明显。我们可以在一次就诊中，多次反复对患牙进行脱敏治疗；或预约复诊，再次进行脱敏治疗，以增加脱敏效果。

5、格鲁玛脱敏剂可以在树脂充填中使用吗？

答：可以，因为格鲁玛脱敏剂没有成膜性，不会影响树脂的粘接；甚至有实验证明，格鲁玛脱敏剂的存在，可以增加粘接强度。

6、格鲁玛脱敏剂可以在牙齿制备后使用吗？

答：可以，格鲁玛脱敏剂没有成膜性，不会影响冠的粘接强度。